

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになられた後も、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全上の注意

- ⚠ 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
- ⚠ 注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり物的損害の可能性のあるもの

⚠ 警告

- ・改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。(けがの原因)
- ・幼児や子供だけで使用させないでください。(けがの原因)
- ・風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしないでください。(劣化の原因)

⚠ 注意


- ・鋭利な部品や角部があります。取り扱い時にご注意ください。
- ・ビスのゆるみはガタツキや手を傷つけたり、思わぬ不具合の発生の原因となります。確実に固定してください。
- ・定期的に点検し、ゆるみを感じられたときは各部のネジを調整し、適切な作動でご使用ください。(破損の原因)
- ・ぶら下がったりしないでください。(破損・脱落の原因)
- ・物をぶつけたりしないでください。(破損の原因)
- ・長時間紫外線に晒されることにより劣化する場合があります。
- ・接着剤やテープなどの粘着剤に含まれる成分により反応を起こし、変形、割れ、変色など破損の原因となる場合がありますので、ご使用にならないでください。
- ・お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しないでください。(ひび割れの原因)

お手入れ方法

- ・本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ります。汚れがひどいときには、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、洗剤が残らないように水拭きした上で乾拭きしてください。
- ・酸性洗剤や塩素系洗剤はご使用にならないでください。
- ・埃が積もると錆が出やすくなりますので時々埃を取り除いたり、柔らかい布などで拭いたりしてください。


使用方法

- 1** 手袋やマスク・エプロンなど医療用のPPE(個人防護具)を本品に入る内容物箱対応サイズ内のもので用意ください。
最大：H130×W240×D90
最小：H95×W135×D55
※上記範囲以外のものは収納できない可能性があります。

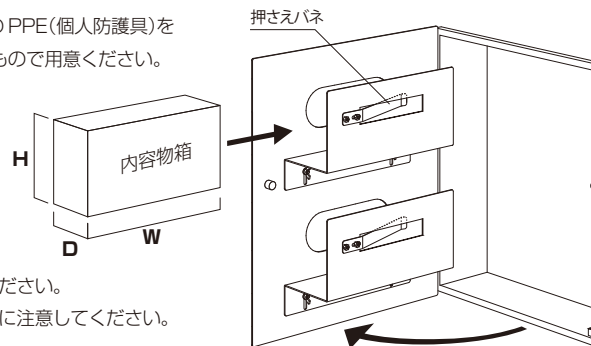


- 2** 扉を開け横からPPEを差し込んでください。
※扉にPPEを押し付ける押さえバネに注意してください。

- 3** 内容物を取り出しやすい高さに調整します。
※蝶ナットをゆるめ高さを調整し、内容物がきちんと取り出しできるか確認してください。

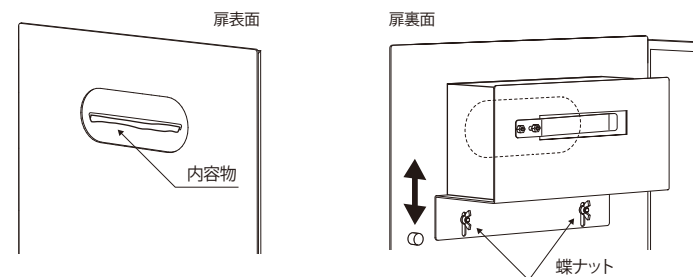


- 4** 付属の用途シールから内容物にあつたものをお貼りください。

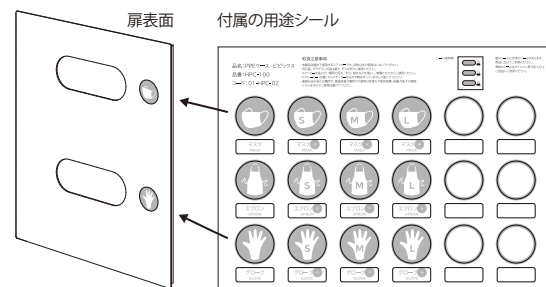

※HPC-100-2-UDHのみ

消毒液ポンペの入る大きさはH300×W320×D120です。
この範囲内での消毒液ポンペをご用意ください。

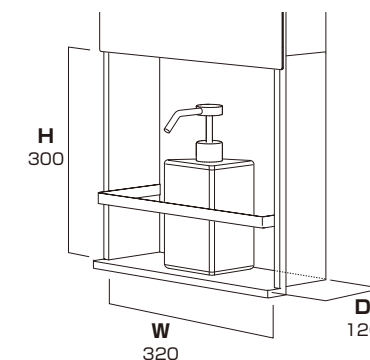

※埃の侵入を防止するシリコンシートもご用意しております。
本品ご注文時にご連絡いただければ取り付けいたします。