

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになられた後も、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全上の注意

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり物的損害の可能性のあるもの

⚠ 警告

- ・改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。(けがの原因)
- ・幼児や子供だけで使用させないでください。(けがの原因)
- ・風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしないでください。(劣化の原因)
- ・不安定な場所に置かないでください。(けがの原因)

⚠ 注意


- ・鋭利な部品や角部があります。取り扱い時にご注意ください。(けがの原因)
- ・定期的に点検し、ゆるみを感じられたときは各部のネジを調整し、確実に固定してください。(破損の原因)
- ・ぶら下がったりしないでください。(破損・脱落の原因)
- ・落としたり物をぶつけたり倒したりしないでください。(破損の原因)
- ・長時間紫外線に晒されることにより劣化する場合があります。
- ・接着剤やテープなどの粘着剤に含まれる成分により反応を起こし、変形、割れ、変色など破損の原因となる場合がありますので、ご使用にならないでください。
- ・お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しないでください。(変色・材質劣化の原因)
- ・金属たわしやナイロンたわしなどは使わないでください。(傷の原因)

お手入れ方法

- ・本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ります。汚れがひどいときには、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、洗剤が残らないように水拭きした上で乾拭きしてください。
- ・酸性洗剤や塩素系洗剤はご使用にならないでください。
- ・埃が積もると錆が出やすくなりますので時々埃を取り除いたり、柔らかい布などで拭いたりしてください。
- ・水などで濡れた場合は、そのまま放置せず必ず柔らかい布などで拭き取ってください。

使用方法

収納可能 AED サイズ

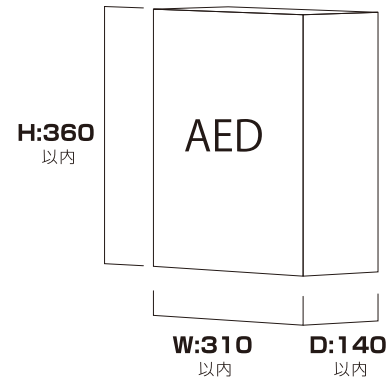

対応 AED

フクダ電子 : HS1 / FRX / FR2
日本光電 : AED-2100 / 3100

※その他の AED の場合

W:310×D:140×H:360 以内が収納可能です。

注意 : 収納時に、AED 本体のインジケータが
表示窓の位置に無い AED は、
収納状態でインジケータを
確認することができません。

